



1 Faire pivoter la pièce arrière dans le sens des aiguilles d'une montre

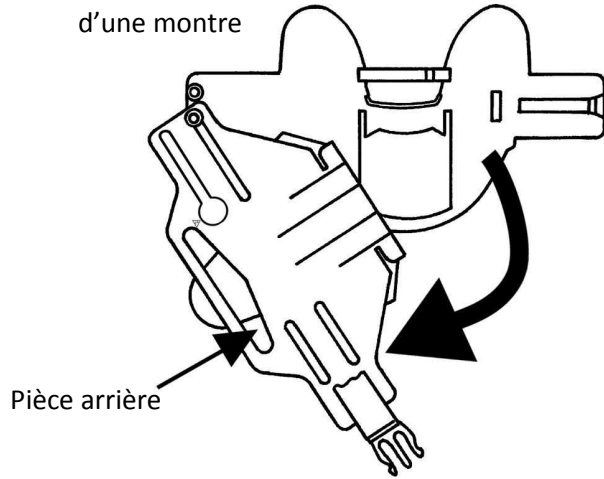


2 Aligner la rondelle avec le marqueur, la placer dans la rainure.


Placer le marqueur derrière la rondelle et faire coulisser dans rainure

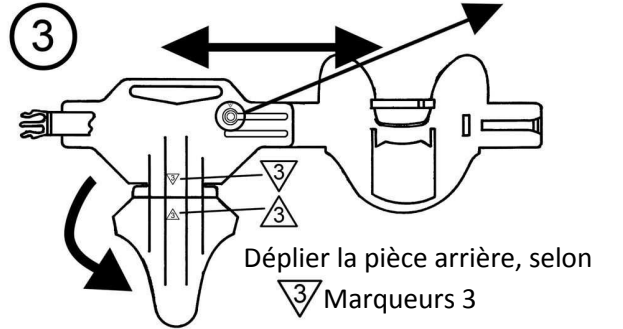

4 Positionner la mentonnière sur le menton et placer le menton sur le rembourrage.

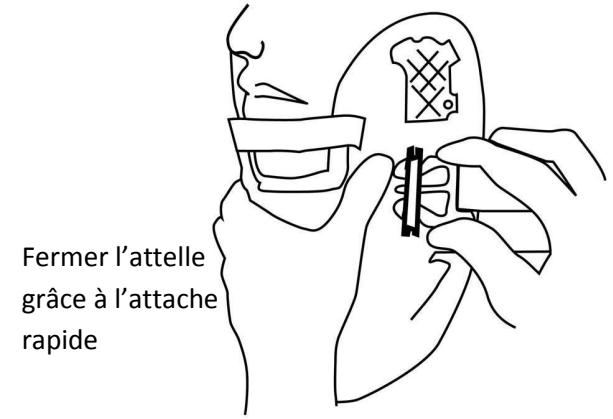


5 Maintenir l'attelle tout en ajustant les 2 sangles Velcro latérales blanches, soit en même temps, soit l'une après l'autre, selon la position de la victime.

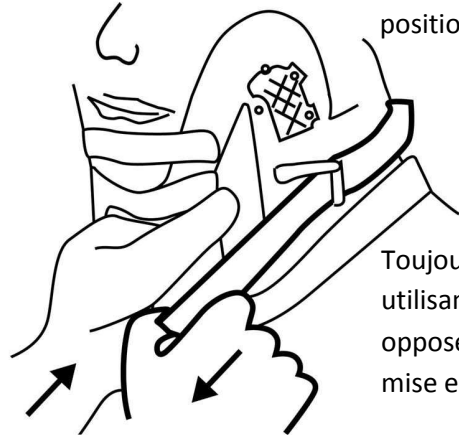


Toujours s'aider en utilisant les forces opposées pour la mise en place

6 Maintenir l'attelle tout en ajustant la partie antérieure sur la poitrine puis bloquer à l'aide des 2 loquets.

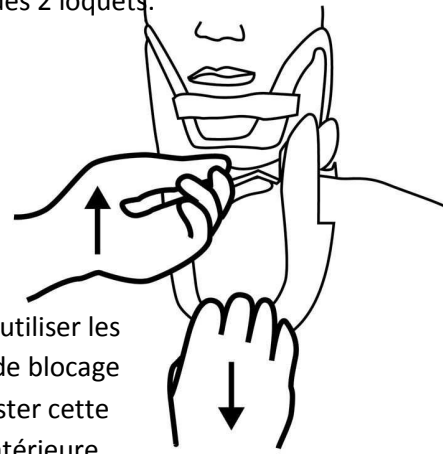

! Ne pas utiliser les loquets de blocage pour ajuster cette partie antérieure

7 Fixer les sangles colorées en les croisant pour les placer sur les emplacements Velcro colorés correspondant

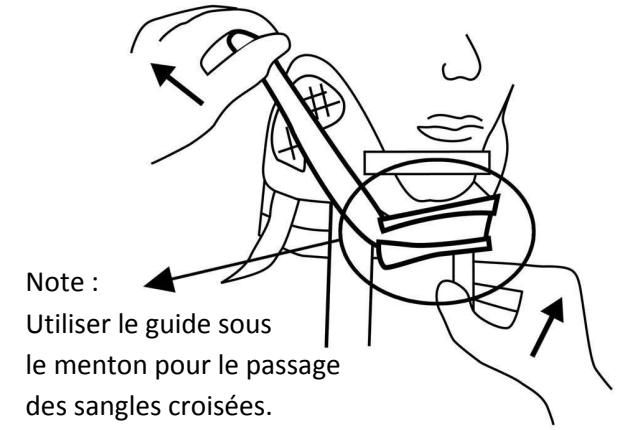

Note : Utiliser le guide sous le menton pour le passage des sangles croisées.